



Nombre

## Faja tubular para abdomen y tórax

Pullover abdominal and thoracic binder

Código externo

02.05.600

Código interno

03.600

Descripción

Brinda soporte firme a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Fabricada con elásticos de alta compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. Su diseño tubular mantiene la presión de forma homogénea en la zona.

Modo de acción

Las fuerzas de compresión que ejerce, proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. La configuración tubular de la faja impide que esta se desajuste y a la vez mantiene la presión en la zona.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad de la piel, y es agradable al tacto; compuesta por poliéster y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

<b>S</b>	63 - 75 cm.	7798094540573
<b>M</b>	75 - 87 cm.	7798094540580
<b>L</b>	87 - 99 cm.	7798094540597
<b>XL</b>	99 - 111 cm.	7798094540603
<b>XXL</b>	111 - 123 cm.	7798094540610

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Colocar la faja a través de la cabeza o las piernas y llevarla hasta el abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Hernia
- \* Hipotonía de la musculatura abdominal
- \* Profilaxis
- \* Hipertonía muscular posterior
- \* Contusiones
- \* Fracturas torácicas
- \* Dolores costales
- \* Traumatismos leves
- \* Fisura de costillas
- \* Desgarro muscular
- \* Eventraciones
- \* Procesos degenerativos

Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Productos relacionados

610 - 611 - 615 - 620 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	160 g. / 0.16 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global