



Nombre

Soporte de clavícula

Clavivle brace

Código externo

02.02.L1

Código interno

16.L1

Descripción

Brinda compresión y estabilización al hueso de la clavícula en casos de fractura y otros traumatismos. Disminuye la movilidad brindando calor terapéutico. Presta soporte al vendaje y contribuye a una rápida y correcta recuperación. Su sistema de tiras con abrojos permite regular la tensión y ajuste del producto acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

El producto aplica fuerzas sobre el hueso de la clavícula a través de las tiras de ajuste, que sostienen, estabilizan y lo ubican en una posición neutra para una mejor y pronta recuperación. También ayuda a una corrección postural progresiva, mejorando la sanación del traumatismo. Su sistema de ajuste y cierre con abrojos permite regular el nivel de tensión adecuado a cada usuario y tratamiento.

Materialidad

Elaborada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de pecho.

S	70 - 85 cm.	7798094546025
M	85 - 106 cm.	7798094546032
L	106 - 122 cm.	7798094546049

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la parte en V del producto en la parte posterior del cuello. Los pasadores metálicos deben quedar hacia afuera.
3. Pasar las tiras de neoprene sobre los hombros, hacia la espalda por debajo de los brazos.
4. Introducir las cintas con abrojo por los pasadores y abrocharlas regulando la tensión deseada.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Para pieles sensibles utilizar una prenda de algodón debajo del soporte.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Fractura de clavícula
- * Luxación de clavícula
- * Contusiones de manguito rotador
- * Distensiones ligamentarias
- * Dislocación acromioclavicular

Composición

Interior: Policloroaplano 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

E1- 305 - 306 - SLE

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	245 g / 0,245 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global