



Nombre

Faja softy plus tubular
Pullover Softy Plus Support

Código externo

02.05.2800T

Código interno

01.2800T

Descripción

Brinda soporte suave a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias asociadas al área torácica y abdominal, en caso de post-operatorios de cirugía abdominal, dolores lumbares, fisuras costales y post-partos por cesárea. Fabricada con elástico de suave compresión y alta elasticidad.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La cara interna, que permanece en constante contacto con la piel, es de algodón.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094540313
M	75 - 87 cm.	7798094540320
L	87 - 99 cm.	7798094540337
XL	99 - 111 cm.	7798094540344
XXL	111 - 123 cm.	7798094540351

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- Colocar la faja a través de la cabeza o las piernas y llevarla hasta el abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto, es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fisura de costillas
- * Desgarro muscular
- * Contusiones
- * Eventraciones
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Hipertonía muscular posterior
- * Dismetrías
- * Dolor lumbar referido

Composición

Acrílico 46%, Algodón 32%, Elastodieno 15%, Poliéster 7%.

Productos relacionados

2024/2028 - 2400R/3200R - 2800R - 3300/3400

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	90 g. / 0.09 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global