



Nombre

Antifaz gel relax

Relaxing gel eye mask

Código externo

10.01.AR

Código interno

40.AR

Descripción

Brinda frío o calor -según se requiera- a la zona al rededor de los ojos. Alivia dolencias, desinflama la zona ocular y promueve la relajación muscular. El producto consta de un gel dentro de la una bolsa contenedora que puede ser calentado y enfriado múltiples veces sin perder sus propiedades. Se adapta a la forma del cuerpo por lo que resulta anatómico y cómodo al uso.

Modo de acción

El calor está indicado para contracturas, espasmos musculares o rigidez articular. El frío ayuda en la recuperación de toda lesión o traumatismo agudo como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis, toda lesión que se acompañe de un proceso inflamatorio. Por su ajuste regulable se adapta a la forma del rostro, resultando anatómico y confortable.

Materialidad

Compuesto por un gel desarrollado para mantener la temperatura que se le confiera a la compresa. El gel puede ser calentado y enfriado múltiples veces sin perder sus propiedades, sin embargo, no se recomienda sobrecalentar el producto para evitar roturas. La bolsa que contiene al gel permite la transmisión de frío o calor y no produce alteraciones en la piel.

Tabla de talles / Código de barras

Universal	7798094540023
------------------	---------------

Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

CALOR:

1. Para su uso en horno microondas, sumergir el producto en un recipiente con agua hasta que quede completamente cubierto, y calentar a temperatura media durante 30 segundos. O introducir la compresa en un contenedor con agua hirviendo durante 5 minutos.
2. Cubrir con un paño.
3. Aplicar sobre la zona afectada.

FRÍO:

1. Conservar en heladera o freezer (-18°C a -20°C) hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Cubrir con un paño.
3. Aplicar sobre la zona afectada.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. En caso de presentarse fisuras en la bolsa contenedora, no inhalar ni ingerir el gel y evitar el contacto con los ojos y la piel. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación debe oscilar entre 15 y 30 minutos. Puede almacenarse en heladera o freezer para uso de emergencia, pero la permanencia de períodos prolongados en el freezer acorta la vida útil del producto. **Se recomienda no plegar al introducirlo al freezer y cubrir con un paño antes de aplicar. No calentar el producto de forma directa en el microondas.**

Modo de lavado y Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. No exponer al sol o altas temperaturas. Mantener alejado de oxidantes y ácidos.

Patologías

- * Traumatismos.
- * Tensiones musculares.
- * Desgarros.
- * Espasmos musculares.
- * Tendinitis.
- * Contusiones.
- * Retracciones musculares.
- * Irritaciones.
- * Inflamaciones.
- * Sequedad ocular

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Celeste
NCM	3824.90.89
Peso sin envase	115g / 0,115Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

Gel: agua, glicerol, carboximetil celulosa sódica, conservante MAPCH GLP.

Productos relacionados

AC - VF - VFN