



Nombre

Cinta adhesiva microporosa

Microporous tape

Código externo

1460-CM

Código interno

P771WCM

Descripción

La cinta adhesiva microporosa es un no tejido derivado de la celulosa con una capa de adhesivo hipoalergénico. Esta cinta es permeable al aire y presenta una excelente resistencia adhesiva y es de fácil uso.

Recomendada para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la sujeción de apósitos, vendajes y dispositivos médicos, en todo tipo de pieles. Su uso es adecuado para tratamientos prolongados.

Es adecuada tanto para uso en hospitales y clínicas como en entornos deportivos y en el hogar. Imprescindible para cualquier botiquín de primeros auxilios.

Fácilmente removible. No produce residuos.

Incluye dispenser con cortador para facilitar la manipulación y corte de la cinta.

Modo de acción

La cinta tiene una excelente adhesión a la piel. Gracias al adhesivo, permite que la cinta se mantenga en su lugar sin la necesidad de sujetadores adicionales, ya sea para asegurar almohadillas o vendajes en cualquier zona del cuerpo.

Es microporosa y permeable, lo que permite la respirabilidad de la piel. Además es resistente a la humedad y a la abrasión.

Materialidad

La cinta está fabricada con viscosa, una fibra derivada de la celulosa, con excelentes propiedades de absorción de humedad y gran transpirabilidad de la piel, lo que facilita su uso en todo tipo de pieles.

Tabla de tallas / Código de barras

Según ancho de la cinta

Código	Tamaño	Código de barras
CM 1,25	1,25 cm x 9 m	7798094541778
CM 2,5	2,5 cm x 9 m	7798094541785
CM 5	5 cm x 9 m	7798094541792

Instrucciones de uso

1. Limpiar la zona de aplicación.
2. Aplicar con movimientos envolventes la zona aplicando una leve presión.
3. Al finalizar la aplicación, cortar el excedente de la venda y asegurar el extremo presionando suavemente.
4. Acomodar hasta llevarlo a su grado óptimo de confort

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste de la cinta puede impedir la correcta circulación sanguínea. Limpiar la piel antes de aplicar la cinta. Se recomienda reemplazar la cinta cada 3 días. Producto no reutilizable. Descartar una vez utilizado.

Envase	Opp box individual	
Cantidad	1 unidad	
Color	Blanco	
NCM	3005.10.90.000W	
Peso sin envase	1,25 cm x 9 m	0,0000 kg
	2,5 cm x 9 m	0,0000 kg
	5 cm x 9 m	0,0000 kg
Peso con envase	1,25 cm x 9 m	0,0167 kg
	2,5 cm x 9 m	0,0333 kg
	5 cm x 9 m	0,0667 kg
Volumen con envase	1,25 cm x 9 m	0,000081 m3
	2,5 cm x 9 m	0,000140 m3
	5 cm x 9 m	0,000236 m3
Industria/Origen	China	

Modo de lavado y Almacenamiento

Almacenar en lugar limpio y protegido de la humedad. No exponer al sol o altas temperaturas.



Patologías

- * Cicatrización de heridas
- * Sujeción de apósitos
- * Otros

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-35 CUIT N°: 30-59163398-4. Venta libre

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% viscosa

Productos relacionados

CTR - COZ - CSE