



Nombre

Cinta adhesiva de seda

Silk tape

Código externo

1460-CSE

Código interno

P771WCSE

Descripción

La cinta adhesiva de seda es un tejido de acetato con una capa de adhesivo, es una cinta médica de alta resistencia y adherencia.

Recomendada para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la sujeción de apósitos, vendajes y dispositivos médicos, en todo tipo de pieles. Su uso es adecuado para tratamientos prolongados.

Es adecuada tanto para uso en hospitales y clínicas como en entornos deportivos y en el hogar. Imprescindible para cualquier botiquín de primeros auxilios.

Fácilmente removible. No produce residuos.

Modo de acción

La cinta tiene una excelente adhesión a la piel. Gracias al adhesivo, permite que la cinta se mantenga en su lugar sin la necesidad de sujetadores adicionales, ya sea para asegurar almohadillas o vendajes en cualquier zona del cuerpo. Es hipoalergénica y resistente al agua, lo que permite el uso para todo tipo de pieles y una mayor durabilidad en tratamientos prolongados. Es un tejido suave al tacto, permitiendo mayor confort en su uso y aplicación.

Materialidad

La cinta está fabricada con un tejido de acetato, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia al agua. El adhesivo hipoalergénico es suave para la piel y proporciona una sólida sujeción sin causar irritación.

Tabla de tallas / Código de barras

Según ancho de la cinta

CSE 1,25	1,25 cm x 5 m	7798094541860
CSE 2,5	2,5 cm x 5 m	7798094541877
CSE 5	5 cm x 5 m	7798094541884

Instrucciones de uso

1. Limpiar la zona de aplicación.
2. Aplicar con movimientos envolventes la zona aplicando una leve presión.
3. Al finalizar la aplicación, cortar el excedente de la venda y asegurar el extremo presionando suavemente.
4. Acomodar hasta llevarlo a su grado óptimo de confort

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste de la cinta puede impedir la correcta circulación sanguínea. Limpiar la piel antes de aplicar la cinta. Se recomienda reemplazar la cinta cada 3 días. Producto no reutilizable. Descartar una vez utilizado.

Envase	Opp box individual	
Cantidad	1 unidad	
Color	Blanco	
NCM	3005.10.90.000W	
Peso sin envase	1,25 cm x 9 m	0,0076 kg
	2,5 cm x 9 m	0,0161 kg
	5 cm x 9 m	0,0327 kg
Peso con envase	1,25 cm x 9 m	0,0108 kg
	2,5 cm x 9 m	0,0204 kg
	5 cm x 9 m	0,0399 kg
Volumen con envase	1,25 cm x 9 m	0,000039 m3
	2,5 cm x 9 m	0,000070 m3
	5 cm x 9 m	0,000133 m3
Industria/Origen	China	

Modo de lavado y Almacenamiento

Almacenar en lugar limpio y protegido de la humedad. No exponer al sol o altas temperaturas.



Patologías

- * Cicatrización de heridas
- * Sujeción de apósitos
- * Otros

Composición

100% acetato

Productos relacionados

CTR - COZ - CM

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-35 CUIT N°: 30-59163398-4. Venta libre

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global