



Nombre

Chaleco Corrector Postural

Posture Corrector Vest

Código externo

1203-E2

Código interno

P201WE2

Descripción

Diseñado para brindar soporte gradual en la zona dorsal y de hombros, contribuye a mantener la columna equilibrada durante las actividades del día a día. Su uso regular ayuda a aliviar sobrecargas, tensiones y contracturas musculares en la región cérvico-dorsal, frecuentemente provocadas por posturas incorrectas o esfuerzos prolongados. Cuenta con un sistema de sujeción regulable sobre los hombros que permite adaptar la compresión y el ajuste al contorno de cada usuario, garantizando una experiencia personalizada y cómoda.

Modo de acción

La tensión que se aplica al ajustar el producto genera que los hombros se desplacen hacia atrás, reubicando la columna en la postura adecuada. Su base dorsal actúa como punto de apoyo central y el sistema de sujeción regulable con cierre de velcro permite adaptarse al contorno corporal de cada usuario, aliviando tensiones y contracturas.

Materialidad

Elaborado en neoprene de 3,5 mm de espesor con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush en su cara interna. Este material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad otorga compresión uniforme y controlada, favoreciendo el confort y la sensación de soporte durante su uso. Su interior en plush resulta suave y agradable al contacto directo con la piel.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho.

Talla	Medida	Código de barras
S	71 - 85 cm.	7798128676742
M	86 - 106 cm.	7798094542256
L	107 - 122 cm.	7798094542294

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- Colocar el corrector pasando las correas por los hombros.
- Ajustar de forma progresiva hasta lograr una tensión uniforme y controlada.
- Verificar que el producto quede firme y cómodo, sin generar molestias ni restringir la circulación.

Advertencias y Recomendaciones

Utilizar inicialmente por períodos cortos e incrementar el tiempo de uso de manera gradual. Se recomienda utilizar el producto sobre una prenda, evitando el contacto directo con la piel. No utilizar durante el descanso nocturno salvo indicación profesional. Suspender su uso ante la aparición de dolor, molestias persistentes, irritación o alteraciones en la piel. En caso de patología preexistente, consultar con un profesional de la salud antes de utilizar el producto.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	
Peso sin envase	68 gr.
Peso con envase	100 gr.
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano con agua fría y jabón neutro. No utilizar lavandina ni productos abrasivos. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No planchar ni exponer a fuentes directas de calor. No utilizar secadora. Secar a la sombra y en posición horizontal.



Patologías

- * Cifosis
- * Dolor cervical, torácico y/o lumbar.
- * Hernias de disco
- * Lumbalgias
- * Protusiones
- * Profilaxis
- * Mialgias

Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

E1 - L1- 305 - 306

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Uso: sin prescripción

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global