



Nombre

Casco Frío Calor

Hot/Cold Gel Head Cap

Descripción

El casco frío/calor contribuye al alivio del dolor, la inflamación y las molestias en la zona de la cabeza. Su diseño permite aplicar tanto frío como calor. En frío puede generar una sensación refrescante y relajante, ideal luego de actividad física o en momentos de tensión. En caliente puede brindar una sensación de alivio y descanso, especialmente útil en casos de cansancio, rigidez o estrés acumulado.

Código externo

1601-HB1

Código interno

P501WHB1

Modo de acción

Diseñado con hydrogel para favorecer la disminución del dolor, la inflamación y las sensaciones de incomodidad en la región cefálica. Gracias a su diseño versátil, puede usarse para aplicar frío o calor según la necesidad.

Materialidad

Realizado en tejido elástico de poliamida y spandex, ofrece comodidad y ajuste perfecto. El hydrogel aporta alivio y bienestar, pudiendo usarse en frío o calor según la necesidad. Ideal para relajar, reducir molestias y recuperar la sensación de confort.

Tabla de talles / Código de barras

| | | |
|----------|-----------|---------------|
| U | Universal | 7798094542195 |
|----------|-----------|---------------|

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

Para frío:
1. Colocar el hydrogel en el freezer durante al menos 2 horas antes de su uso.
2. Colocarlo sobre la cabeza, con el logo hacia adelante y cubriendo la zona de los ojos, asegurándose de que cubra adecuadamente la zona dolorida.
3. Se recomienda aplicar la compresa en sesiones de 15-20 minutos, varias veces al día según necesidad.

Para calor:
1. Calentar en el microondas durante 30 segundos. El hydrogel debe estar a temperatura ambiente, no congelado. Si es necesario mayor calor, agregar incrementos de 10 segundos, sin exceder un total de 60 segundos, hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Colocarlo en la cabeza, con el logo hacia adelante y cubriendo la zona de los ojos, asegurándose de que cubra adecuadamente la zona dolorida.
3. Se recomienda aplicar la compresa en sesiones de 15-20 minutos, varias veces al día según necesidad.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. De presentarse fisuras en la bolsa contenedora, no inhalar ni ingerir el gel y evitar el contacto con los ojos y la piel. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación, debe oscilar entre 15 y 30 minutos. Antes de aplicar, verificar que la temperatura sea adecuada para evitar molestias en la piel.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro para eliminar residuos. Secar a la sombra en un lugar bien ventilado. No retorcer. Evitar el uso de productos químicos agresivos. Guardar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para preservar sus propiedades terapéuticas.



Patologías

- * Migrañas
- * Dolores de cabeza tensionales
- * Cefaleas sinusales (por sinusitis)
- * Estrés y fatiga visual
- * Inflamación de los senos paranasales
- * Fiebre

Composición

Tejido: poliamida 82% spandex 18%
Gel: hydrogel

Productos relacionados

HC1 - HR1 -HT1

PTM

| | |
|--------------------|-------------------|
| Envase | Estuche de cartón |
| Cantidad | 1 unidad |
| Color | Negro |
| NCM | 3824.99.89. |
| Peso sin envase | 560 gr. |
| Peso con envase | |
| Volumen con envase | |
| Industria/Origen | China |