



Nombre

Muñequera DYNAMIC

Dynamic wrist support

Código externo

01.20.M20

Código interno

16.M20

Descripción

Brinda sujeción para casos de traumatismos de muñeca y dedo pulgar, así como también colabora con el tratamiento de pacientes con trastornos neuromotores. Indicada para inmovilizar la articulación y evitar la flexo-extensión del pulgar. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado. Se presenta en dos variantes: mano derecha y mano izquierda.

Modo de acción

Cuenta con dos ballenas rectas y una palmar curva, las cuales dan soporte rígido a la muñeca, la mantienen en una posición neutra y evitan movimientos involuntarios. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos de muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Se puede ajustar el producto según la necesidad del tratamiento regulando los abrojos. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la a contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno en el nacimiento de los dedos.			
		M20 Derecha	M20 Izquierda
XXS	11,5 cm	7798128670979	7798128671150
XS	13 cm	7798128670986	7798128671167
S	14,5 cm	7798128670993	7798128671174
M	15,5 cm	7798128671006	7798128671181
L	16,5 cm	7798128671013	7798128671198
XL	19 cm	7798128671020	7798128671204
XXL	21 cm	7798128671037	7798128671211

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Lila
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	95g / 0,095 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Introducir el pulgar por el orificio de la muñequera. La ballena rígida curvada y la cara del textil de plush deben quedar del lado de la palma.
3. Ajustar el abrojo medio, rodeando la muñeca y pasando a través de la hebilla.
4. Abrochar los abrojos restantes al dorso de la mano y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Tendinitis del Túnel Carpiano
- * Contusiones
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca
- * Tenosinovitis
- * Artrosis
- * Esguinces medios
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Trastornos neuromotores
- * Afecciones ligamentarias

Productos relacionados