



Nombre

## Venda Elástica Tensacta

### Tensacta Elastic Bandage

Código externo

04.03.VT

Código interno

70.VT

Descripción

Brinda soporte activo en el tratamiento y prevención de edemas e insuficiencia venosa. Indicada en post-operatorios de cirugía varicosa, flebitis, trombosis y tromboflebitis. Ayuda a prevenir la formación de hematomas y alivia el dolor. La venda está elaborada a partir de hilados de alta calidad e hipoalergénicos, obteniendo como resultado un producto de alta elasticidad, compresión y durabilidad. Diseñada con el propósito de ayudar al paciente a utilizar la venda, sus rectángulos impresos se tornan cuadrados cuando la tensión de la venda es la adecuada.

Modo de acción

El vendaje compresivo tiene como objetivos: reducir el edema y mejorar el retorno venoso. Una mayor compresión aplicada en una zona puntual que disminuye de forma ascendente, favorece el correspondiente regreso del flujo sanguíneo al corazón, disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos, Brinda calor terapéutico acelerando el proceso de recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión moderada, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto. Compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster.

Tabla de tallas / Código de barras

Talla	Código de barras
2.5 mts.	7798128670146
3 mts.	7798128670160
25 mts.	7798128670153
50 mts.	7798128670207

7798128673499

Instrucciones de uso

1. Realizar el vendaje alrededor de la zona afectada en forma de espiral, comenzando por el extremo del miembro y encimando la mitad de la venda sobre la colocada anteriormente. Estirar la venda hasta que el rectángulo pase a ser un cuadrado, manteniendo esa tensión durante todo el vendaje de la zona afectada. El estire debe disminuir con el progreso del vendaje.
2. Verificar que no se formen arrugas en la venda y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
3. Al finalizar, colocar en el extremo de los ganchos sujetadores.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Realizar el tratamiento cuando el edema sea menor, por la mañana en la cama o después de una sesión de elevación de piernas. Una excesiva tensión de ajuste de la venda puede impedir la correcta circulación sanguínea. Quite el vendaje si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente el área y vuelva a realizar un vendaje cuando se recupere.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \*Esguinces de primer y segundo grado.
- \*Tendinitis
- \*Tenosinovitis
- \*Distensiones musculares
- \*Rotura fibrilar parcial
- \*Fisuras y epifoliosis no desplazadas
- \*Linfedemas
- \*Insuficiencias venosas crónicas
- \*Flebotrombosis
- \*Tromboflebitis
- \*Entorsis
- \*Lesiones articulares

Composición

Algodón 75%  
Elastodieno 20%  
Poliéster 5%

Productos relacionados

VAC - VA

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global