



Nombre

## Faja espinal aireada

### Breathable spine support

Código externo

02.07.695

Código interno

05.695

Descripción

Brinda soporte firme, calor terapéutico y compresión a la zona alta, media y baja del tronco. Indicada para la corrección postural y el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica. Posee bandas entrelazadas en la zona posterior, que aplican un refuerzo de compresión y tiras de ajuste sobre los hombros que permiten ubicar las ballenas espinales de manera correcta. Confeccionada con elástico aireado de alta compresión que permite la respirabilidad de la piel. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Funciona como sostén de la columna vertebral, evitando flexiones y extensiones no deseadas. Cuenta con dos ballenas flexibles a los lados de la cintura que limitan movimientos laterales y dos ballenas rígidas de aluminio que limitan el movimiento de la espina dorsal. Las tiras sobre los hombros permiten aplicar fuerzas sobre las ballenas espinales posteriores, las cuales limitan la flexo-extensión y el cinturón angosto permite aplicar compresión adicional.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico aireado, que cuenta con un entramado que permite el paso de aire, brindando compresión firme y respirabilidad a la piel; compuesto por poliamida, algodón y elastodieno.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de cintura.

S	63 - 75 cm	7798128671938
M	75 - 87 cm	7798128671945
L	87 - 99 cm	7798128671952
XL	99 - 111 cm	7798128671969
XXL	111 - 123 cm	7798128671976

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja en la zona baja de la espalda, las tiras angostas deben quedar ubicadas del lado externo del producto.
3. Abrochar la parte inferior de la faja, ajustando según necesidad. Luego realizar lo mismo con las cintas de refuerzo abdominal.
4. Pasar las tiras de la espalda hacia adelante por sobre los hombros, luego por debajo de las axilas hacia atrás.
5. Cruzar las tiras por la espalda, rodeando la cintura y ajustar los abrojos en la zona abdominal.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto, es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo y quitar las ballenas extraíbles. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Escoliosis
- \* Cifosis
- \* Lordosis
- \* Sacroileítis
- \* Lumbociática o lumbociatalgias
- \* Lumbalgias crónicas
- \* Lumbalgias leves
- \* Espondilosis (o Enfermedad Degenerativa del Disco o EDD)
- \* Espondilolisis
- \* Espondiloartrosis o espondilosis
- \* Eventraciones medias
- \* Hernias
- \* Patologías espinales inespecíficas
- \* Profilaxis
- \* Procesos degenerativos

Composición

Poliamida 50% Algodón 28% Elastodieno 22%

Productos relacionados

600 - 615 - 620 - 660 - 675 - 680 - 665

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	540 g / 0,54 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global