



Nombre

Muñequera inmovilizadora anatómica

Anatomical wrist splint

Código externo

01.01.M7

Código interno

16.M7

Descripción

Brinda soporte rígido a la muñeca, favoreciendo la recuperación de traumatismos, post-operatorios y post-fracturas. La inmovilización de la muñeca permite una rápida desinflamación del tendón medio. Las ballenas anatómicas de aluminio se adaptan a la posición natural de la articulación, pudiendo readecuar su curvatura. Su sistema de cierre con abrojos, permite ajustar el producto acorde al tratamiento indicado. El producto se presenta en dos variantes: para mano derecha y para mano izquierda.

Modo de acción

La muñequera cuenta dos ballenas rígidas que abarcan desde la parte proximal de la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos, la cual evita movimientos de flexión o extensión de la articulación. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos de muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Las fuerzas multidireccionales aplicadas por el producto mantienen la articulación en una posición neutra. Se puede ajustar el producto según la necesidad del tratamiento regulando los abrojos. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Elaborada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno en el nacimiento de los dedos.			
	M7 Derecha	M7 Izquierda	
S	13 - 16 cm	7798128672539	7798128672577
M	16 - 18 cm	7798128672546	7798128672584
L	18 - 20 cm	7798128672553	7798128672591
XL	20 - 22 cm	7798128672560	7798128672607

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar el lado curvo de la ballena contra la palma de la mano. Tener en cuenta que el dedo pulgar debe quedar entre los tres abrojos inferiores y el abrojo superior.
3. Cubrir la mano con la parte de la muñequera que no tiene abrojos.
4. Tomar el lado que contiene los abrojos y rodear la muñeca en forma completa hasta abrochar los mismos. La tira más larga debe introducirse por el pasador metálico y rodear toda la muñeca.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Tendinitis del Túnel Carpiano
- * Contusiones
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca
- * Tenosinovitis
- * Artrosis
- * Esguinces medios
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Trastornos neuromotores
- * Afecciones ligamentarias

Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	70 g. / 0.07 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global