



Nombre

Faja sacrolumbar alta aireada

Breathable high lumbo-sacral support

Código externo

02.07.680

Código interno

05.680

Descripción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Confeccionada con elástico aireado de alta compresión que permite la respirabilidad de la piel. Cuenta con cinco ballenas flexibles en la parte posterior que ayudan a una mejor postura. Las bandas de ajuste laterales permiten una mayor regulación, y su entrecruzamiento posterior ayuda a una mayor contención. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. Las ballenas plásticas flexibles y las bandas posteriores entrecruzadas colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico aireado, que cuenta con un entramado que permite el paso de aire, brindando compresión firme y respirabilidad a la piel; compuesto por poliamida, algodón y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798128671884
M	75 - 87 cm.	7798128671891
L	87 - 99 cm.	7798128671907
XL	99 - 111 cm.	7798128671914
XXL	111 - 123 cm.	7798128671921

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente de la faja.
3. Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	205 g. / 0.205 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Lumbociática o lumbociatalgias
- * Lumbalgias crónicas
- * Lumbalgias leves
- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Eventraciones medias
- * Patologías lumbares inespecíficas
- * Procesos degenerativos
- * Hernias
- * Sacroileítis
- * Profilaxis

Composición

Poliamida 50% Algodón 28% Elastodieno 22%

Productos relacionados

F1 - 630 - 635 - 640 - 670 - 675 - 665 - 695