



Nombre

Faja regulable para abdomen y tórax

Adjustable abdominal and thoracic binder

Código externo

02.05.615

Código interno

03.615

Descripción

Brinda soporte firme a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Fabricada con elásticos de alta compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Las fuerzas de compresión que ejerce, proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad de la piel, y es agradable al tacto; compuesta por poliéster y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094540726
M	75 - 87 cm.	7798094540733
L	87 - 99 cm.	7798094540740
XL	99 - 111 cm.	7798094540757
XXL	111 - 123 cm.	7798094540764

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Hernia
- * Profilaxis
- * Contusiones
- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fisura de costillas
- * Desgarro muscular
- * Eventraciones
- * Procesos degenerativos
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Fracturas torácicas
- * Hipertonía muscular posterior

Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Productos relacionados

600 - 610 - 611 - 620 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	160 g. / 0.16 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global