



Nombre

## Cabestrillo con faja inmovilizadora de hombro

Universal foam sling and swathe

Código externo

01.04.1216

Código interno

25.1216

Descripción

Inmoviliza hombro y brazo, permitiendo una correcta y pronta recuperación. Cuenta con dos piezas: un cabestrillo que sostiene el antebrazo, y una faja, para sostener el brazo cerca del tronco e impedir que éste se mueva lateralmente. Las tiras regulables sobre los hombros cuentan con pasadores que permiten ajustar el producto a la altura deseada, los abrojos brindan firme sujeción de las mismas sobre el cabestrillo. Esto permite adaptar el producto a diferentes usuarios y otorgarle el ajuste adecuado para cada tratamiento. Puede utilizarse en ambos brazos.

Modo de acción

Funciona como inmovilizador de hombro, impidiendo los movimientos de abducción, rotación y antepulsión. Se utiliza en casos de reposo absoluto de la articulación glenohumeral. El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación escapulo humeral, además de producir la descarga de la articulación del hombro, dejándola en reposo para una correcta recuperación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro.

Materialidad

Elaborado con goma espuma bondeada con velour de poliamida y no-tejido de polipropileno. El velour de poliamida de la cara externa, colabora con la sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está compuesto por goma espuma de poliuretano de 8 milímetros de espesor, la cual otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles golpes.

Tabla de tallas / Código de barras

**UNIVERSAL** 7798094541105

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar todos los abrojos.
2. Regular el largo de las tiras mediante los pasadores.
3. Introducir el brazo a inmovilizar a través del cabestrillo.
4. Pasar las tiras del cabestrillo sobre el pecho y luego por la espalda. Cruzarlas y pasarlas por debajo de los brazos hasta abrochar el abrojo de las tiras en la parte baja del cabestrillo.
5. Colocar la faja alrededor del tronco, por debajo del brazo libre, por encima del brazo a inmovilizar y sobre el cabestrillo.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	195 g. / 0.195 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Espuma de poliuretano 56% - Poliamida 24%  
- Polipropileno 20%

Patologías

- \* Fracturas subcapitales de húmero
- \* Fracturas de clavícula
- \* Luxaciones acromioclaviculares
- \* Traumatismos de hombro y brazo
- \* Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- \* Luxaciones de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- \* Subluxaciones de la articulación escapulo humeral

Productos relacionados

501 - 501N - 502 - 503 - 504