



Nombre

Abductor de juanete

Bunion corrector

Código externo

03.01.J1

Código interno

16.J1

Descripción

Brinda corrección progresiva y calor terapéutico. Indicado para el tratamiento nocturno de hallux valgus (Juanete) y post-operatorios. Contiene una ballena de aluminio que ayuda a corregir la desviación del primer dedo del pie y a prevenir su avance. Su sistema de cierre con abrojos, permite ajustar el producto acorde al tratamiento indicado, y se adapta a cada usuario. Puede utilizarse en ambos pies.

Modo de acción

Su ballena de aluminio contiene la desviación del primer dedo del pie, para evitar que la patología avance. Se puede ajustar el producto según la necesidad del tratamiento regulando los abrojos. Brinda calor terapéutico promoviendo el aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración..

Materialidad

Elaborado en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. Material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención multidireccional, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. El jersey de poliamida ofrece control de elasticidad, es suave al tacto y aumenta la durabilidad y resistencia.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado

S	34 - 37	7798128670801
M	37 - 41	7798128670818
L	41 - 46	7798128670825

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Colocar el producto con la ballena del lado interno del pie.
2. Pasar la tira más corta alrededor del primer dedo del pie y abrochar.
3. Ajustar la tira central rodeando el empeine.
4. Pasar la tira larga por detrás del tobillo, luego por sobre el empeine y ajustar el abrojo.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.
Indicado para usar durante la noche.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

* Hallux valgus o juanete

Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

6500

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	43 g. / 0.043 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global